



# NRX® STRAP

- Jedna páska, neomezené možnosti!



## NRX® Strap · Flekční kontraktura lokte nebo úžinový syndrom nervus ulnaris

**Materiál:**

NRX® Strap 110 mm a 50 mm. Pro větší stabilitu mohou být také použity pásy z NRX® Strap PLUS 110 mm

1



Začněte nastříháním celé sady. Jedna manžeta pro horní část paže, jedna pro zápěstí, extenční část a páska pro zajištění přes ohyb lokte.

2




Aplikujte manžetu na horní část paže. Čím výše bude manžeta umístěna, tím lepší bude páka pro extenzi lokte.

3




Aplikujte manžetu na zápěstí.

4

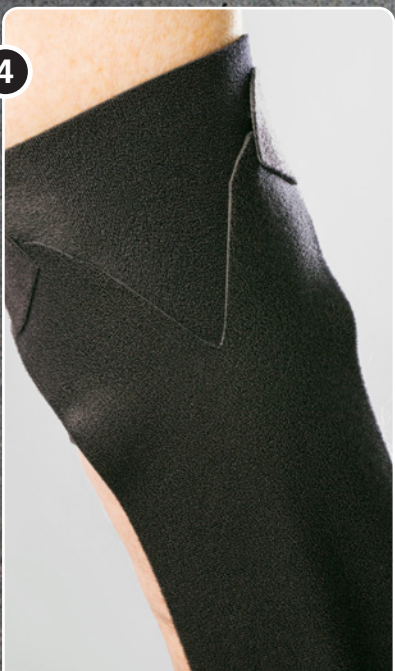

Umístěte dělenou horní část extenční pásky do stran na manžetu na horní části paže.

5

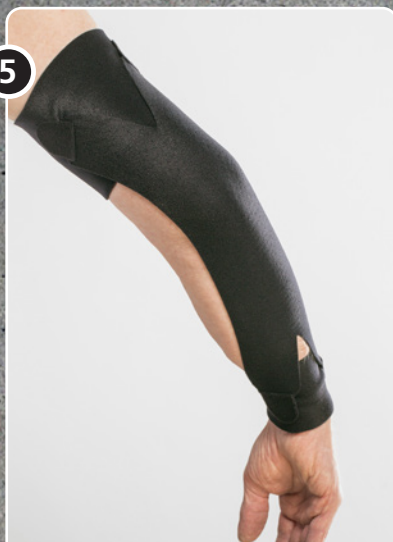

Napněte extenční část tak, aby překrývala loketní kloub. Možná budete muset upravit její délku, aby získala vyšší stupeň napětí. Vždy začněte s minimální silou tahu, který na kontrakturu působí a postupně tah upravujte dle potřeby!

6



Umístěte dělenou spodní část extenční pásky na boky zápěstní manžety.

© Mediroyal Nordic AB 2022

NRX® Strap · Flekční kontraktura lokte nebo úžinový syndrom nervus ulnaris





7

Dokončete použitím pásky přes loketní kloub. To pomůže zafixovat extenční část a také poskytne určitou propriocepci v oblasti lokte.

#### Pokyny k údržbě

NRX<sup>®</sup> Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky uschnout volně na vzduchu.



8

Aplikaci lze také použít na NRX940 ErixThree<sup>®</sup> Neuro ke kontrole polohy ramen. Horní manžeta není nutná.

Pásky lze aplikovat přímo na povrch ErixThree<sup>®</sup> Neuro.

Ortéry jsou naše vášeň!



mediroyal

Mediroyal Nordic AB  
Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna · Sweden  
info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

www.vajer.se · 26088DR · CZ