

## NRX® Strap · Podpora Extenze prstu

**Materiál**

NRX® Strap 50 mm + 1 suchý zip

1



Ustříhněte z 50 mm NRX® Strap pásku dle obvodu prstu, připočtete vždy 2 cm navíc.

2



Aplikujte pásku kolem prstu. Na dorzální straně přeložte oba konce přes sebe a připevněte pomocí dílku ze suchého zipu. Pro větší omezení flexe můžete z palmární strany na pásku přidat suchý zip.

3



Pokud chcete aby byl PIP kloub volný, jednoduše vystříhněte do pásky výřez pro kloub. Ustříhněte suché zipy, které budou svou šířkou a délkou odpovídat části z NRX® Strap.

4



Obtočte pásku kolem kloubu a zajistěte suchým zipem.

### Pokyny k údržbě

NRX® Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky schnout volně na vzduchu.