

## NRX® Strap · Podpora Extenze v MCP kloubu

### Materiál

NRX® Strap 30 mm a 50 mm + 2 suché zipy

1



Ustříhnete pásku z 50 mm NRX® Strap v délce obvodu zápěstí, přidejte navíc 2-3 cm. Poté ustříhnete z 30 mm NRX Strap přibližně 5-6 cm. Na jednom konci nůžkami zaoblete rohy a vystříhnete malý otvor zhruba 3-4 mm od okraje. Otvor by měl být komfortní pro prst a neměl by způsobovat omezení průtoku krve.

2



Na zápěstí připevníte suchým zipem pásku z 50 mm NRX® Strap.

3



Provlákněte prst otvorem a aplikujte pásku z dorzální strany. Ujistěte se, že je MCP v neutrální poloze a není příliš extendován.

4



Připevníte část se suchým zipem k zápěstní pásce. V případě potřeby upravte délku pásky pro zajištění požadované extenze prstu. Vyzkoušejte funkci. V případě potřeby upravte napětí pásky.

### Pokyny k údržbě

NRX® Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky uschnout volně na vzduchu.