



mediroyal



NRX® STRAP

– Jedna páska, neomezené možnosti!

NRX® Strap - Kladívkový prst

Materiál:

NRX® Strap 50 mm a 30 mm

1



Pro zajištění flexe v metatarzálním kloubu může být jednodušší spojit dva klouby současně. Zkuste to individuálně. Kotvicí páska, která jde kolem přední části chodidla by měla být ušitřena z NRX® Strap 50 mm. Páska pro dva klouby by měla být v šířce 50 mm nebo pokud zvolíte variantu pro jeden kloub, pak jej odstříhnete z 30 mm pásky. Ujistěte se, že jsou otvory kruhové.

2



Začněte připevněním kotvicí pásky kolem nohy. Můžete ji připevnit přes metatarzální klouby. Testujte efekt umístění a upravujte dle potřeby. Ujistěte se, že je páska zajištěna pomocí suchého zipu na horní straně pásky.

3



Flekční pásku navlékněte skrz otvory na prsty a zajistěte ji pomocí suchého zipu na spodní straně metatarsální pásky.

4



Po nějaké době může být potřeba upravit napnutí flekční pásky. Před úpravou napětí vyzkoušejte aplikaci s pacientem po dobu 5–10 minut. Flekční páska může být po nějaké době vyměněna z důvodu běžného opotřebení.

Pokyny k údržbě:

NRX® Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky uschnout volně na vzduchu.

© Mediroyal Nordic AB 2019

NRX® Strap · Kladívkový prst