



# mediroyal



## NRX® STRAP

– Jedna páska, neomezené možnosti!

### NRX® Strap - Rotace kyčle

**Materiál:**

NRX® Strap 110 mm a NRX® Strap Double 110 mm

1




Pro zajištění větší stability ustříhnete bederní pás z NRX® Strap Double 110 mm. Stehenní manžeta by měla být ustřížena z NRX® Strap 110 mm. Rotační pás může být ustřížen buď z NRX® Strap 110 mm nebo pro větší stabilitu z NRX® Strap Double.

2



Aplikujte stehenní manžetu na spodní část stehna a zajistěte ji suchým zipem.

3

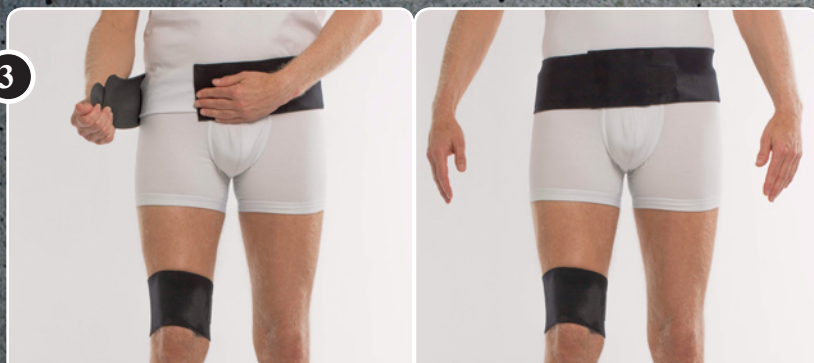


Poté aplikujte bederní pás a zajistěte jej pomocí suchého zipu.

#### Pokyny k údržbě:

NRX® Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásy uschnout volně na vzduchu.

© Mediroyal Nordic AB · 2022  
[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

4

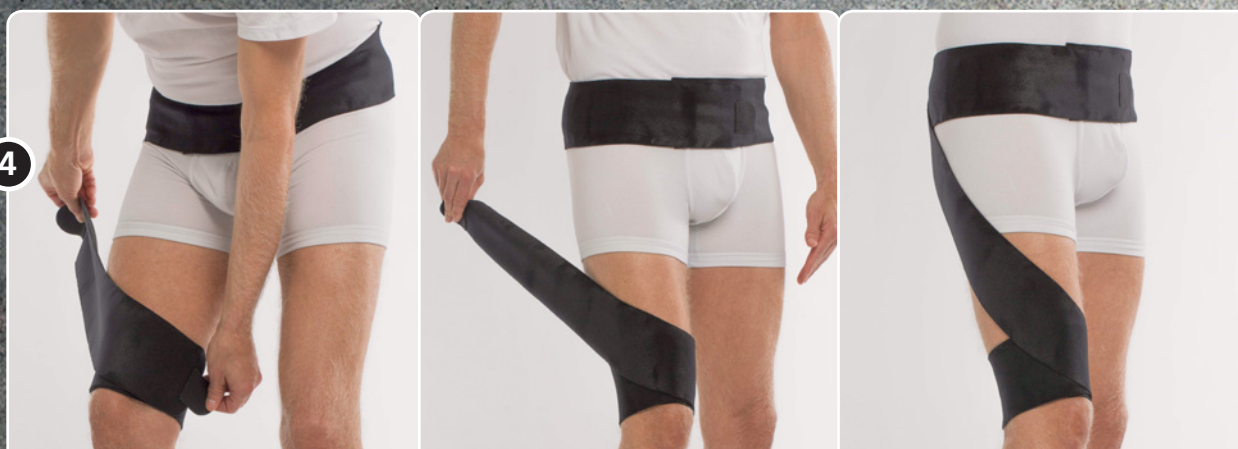

Rotační pás by měl být připevněn jedním velkým suchým zipem na každém konci. Připojte jeden konec na mediální straně (pro zevní rotaci). Rovnoměrně zatáhněte za rotační pás, pokračujte s ním zevně po stehně, přes hýždě a připevněte jej na zadní stranu pásu. Možná budete muset upravit délku rotačního popruhu. Pro zesílení vnější rotace můžete v případě potřeby také připojit dva pásy. Pro vnitřní rotaci připevněte popruh na boční straně a vedte jej v opačném směru.

NRX® Strap · Rotace kyčle