



mediroyal

Ortély jsou naše vášeň



PRO
Terapii
RUKY.cz

NRX[®]

Heat Tape pro materiály

V souvislosti s vývojem materiálů vyvinul Mediroyal speciální pásku pro jejich spojování laminací.

Tato páska je na vnitřní straně vybavena lepidlem, které vyžaduje aktivaci teplem.

Páska je široká 22 mm nebo 35 mm o délce 10 m.

Další variantou je role v rozměru 30cm x 1 m.

Doporučená teplota pro aktivaci speciálního lepidla je

120 – 140 °C. Délku působení lze přizpůsobit dle potřeby.

Je závislá na složení a povrchu spojovaných materiálů.

Doba tuhnutí je cca 10 sekund.

Před aplikací vždy vyzkoušejte na malém vzorku materiálu.

Odstříhnete materiály, které chcete spojit. Položte je vedle sebe na silikonovou podložku nebo teflonový pečicím papír.

Odstříhnete požadovanou délku NRX Heat Tape (připočtete několik centimetrů - páska se může po zahřátí smrštit). Položte pásku přes spoj a překryjte teflonovým pečicím papírem.

Můžete použít i obyčejný pečicím papír. Použijte buď žehličku,

nebo tepelný lis nastavený na 120 – 140 °C.

Pokud používáte žehličku, vypněte funkci napařování.

Aplikujte teplo na povrch po dobu 10 sekund – lehce přitlačte.

Zkontrolujte výsledek, pokud není páska zcela fixovaná,

opakujte proces aplikace tepla – délku působení přizpůsobte.

Pro pevné spojení materiálu se doporučuje aplikovat pásku na horní i spodní stranu spojovaného materiálu.

Pokyny pro praní laminovaného materiálu se řídí doporučením pro praní materiálu, který byl spojován.

NRX[®] Heat Tape

EU490001 NRX[®] Heat Tape 22 mm x 10 m role, Černá,

EU490002 NRX[®] Heat Tape 35 mm x 10 m roll, Černá

EU490004 NRX[®] Heat Tape role 30 cm x 1 m, Černá

NRX[®] je registrovanou značkou Mediroyal Nordic AB

© Mediroyal Nordic AB 2021



OTcare, s.r.o. · Žirovnická 3133/6, Záběhllice 106 00, Praha 10 · proterapiiruky@gmail.com
Tel. +420 606 147 352, + 420 774 330 167 · www.proterapiiruky.cz

