

NRX[®] Strap · Bandáž pro palec a zápěstí

Materiál

NRX[®] 110mm + 2 suché zipy



1 Odstříhnete 15-20 cm ze 110 mm NRX[®] Strap. Zaoblete její okraj a vystříhnete otvor asi 5 mm od okraje mírně od středu. Vyzkoušejte pásku na zápěstí a upravte šířku dle potřeb pacienta. Můžete využít dva způsoby zakončení - pevný konec (spodní provedení) nebo dělený. Rozdělené zakončení se dá snáze aplikovat a může také poskytnout výraznější podporu. Pokud si nejste jisti, začněte s jednoduchým koncem a upravte ho později.



2 Navlékněte otvor na palec a směřujte tah přes hřbet ruky. Ujistěte se, že pásek dobře sedí a otvor na palec není příliš malý.



3 Aplikujte tah pásky kolem zápěstí tak, aby byla podpora komfortní.



4 Zajistěte zipem přes dorzální/ulnární část zápěstí. Pro zvýšení podpory pásky dotáhněte .

Pokyny k údržbě

NRX[®] Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky uschnout volně na vzduchu.