

## NRX® Strap · Twin-bandage – Syndaktilizace

**Materiál**

NRX® 30 mm + 2 suché zipy

1



Odstříhnete dva pruhy v požadované šířce o přibližné délce 8 cm. Šířku jednotlivých dílů suchého zipu přizpůsobte šířce pásek.

2



Připevněte první pásku pod kloubem, který potřebuje oporu. Umístěte pásku mezi prsty a obtočte kolem dokola.

3



Spojte spodní pásku suchým zipem. Příliš neutahujte. Stejným způsobem připevněte horní pásku a obtočte kolem prstu.

4



Spojte suchým zipem a vyzkoušejte stabilitu. V případě potřeby upravte napětí pásek.

### Pokyny k údržbě

NRX® Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky uschnout volně na vzduchu.